





PL 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 187/189  
tel. +48 42 640 48 70, fax +48 42 688 33 84

Instrukcja używania płynnych barwników

ESTETIC ORT KOLOR  

Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej [www.wiedent.com.pl](http://www.wiedent.com.pl) w zakładce oferta/materiały akrylowe/Estetic Ort Kolor.

#### Przeznaczenie

Płynne barwniki Estetic Ort Kolor to wyrób medyczny klasy I przeznaczony do wykonania płyt aparatów ortodontycznych w wielu różnych kolorach.

#### Opis

Koncentraty barwne (pomarańczowy, czerwony, niebieski i żółty) sporządzone na bazie płynu Estetic Ort przeznaczone są do zabarwania przezroczystego tworzywa Estetic Ort, umożliwiając wykonanie kolorowych aparatów ortodontycznych. Koncentraty można mieszać ze sobą w celu uzyskania kolorów innych niż podstawowe.

#### Surowce użyte do produkcji

Płynne barwniki Estetic Ort Kolor składają się z się z płynu zawierającego monomer metakrylanu metylu, dwumetakrylan glikolu etylenowego, N,N dimetylo-p-toluidynę i barwniki organiczne.

#### Sposób postępowania

W celu uzyskania koloru koncentrat barwny w ilości 3-5 kropli wymieszać z 5 ml płynu w przeznaczonym do tego celu naczyniu. Przez dodanie większej ilości koncentratu można uzyskać intensywniejszą barwę. Roztwór jest gotowy do natychmiastowego użycia w sposób opisany w instrukcji używania tworzywa akrylowego Estetic Ort.

#### Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

Płyn łatwopalny, drażniący - unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu słuwać obficie wodą, ewentualnie zgłosić się do lekarza okulisty. Nie wylewać resztek płynu do ujęć kanalizacyjnych. Ostrzega się protetyka przed wdychaniem pyłu podczas wykonywania prac protetycznych. Przy pracach tych zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.

Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjenta następujących wskazówek:

- aparaty ortodontyczne wykonane z użyciem Estetic Ort Kolor należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji tego typu wyrobów;
- nie należy ich moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
- aparaty ortodontyczne, które uległy uszkodzeniu może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
- należy okresowo sprawdzać dopasowanie aparatów ortodontycznych.

#### Opakowania

Komplet:

- 4 x 12,5 ml płynu (niebieski, czerwony, żółty, pomarańczowy).

#### Warunki przechowywania i transportu

W szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach niedostępnych dla dzieci. Podczas przechowywania i transportu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Barwniki Estetic Ort Kolor trzeba zużyć w czasie nie dłuższym niż 5 lata od wyprodukowania.

#### Podstawa prawna

Płynne barwniki Estetic Ort Kolor spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.

#### Stosowane symbole



Wytwórca



Przestrzegaj instrukcji używania



Znak zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745



Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania



Chronić przed światłem słonecznym



Produkt jest wyrobem medycznym



Nr serii



Termin ważności



Data wydania: 17.08.2022

D 3322-7