



Wiedent
PL 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 187/189
tel. +48 42 640 48 70, fax +48 42 688 33 84

Instrukcja używania tworzywa samopolimeryzującego do
wykonywania tymczasowych koron i mostów

ESTETIC SPECIAL  

Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej www.wiedent.com.pl w zakładce oferta/materiały akrylowe/Estetic Special.

Przeznaczenie

Tworzywo Estetic Special to wyrób medyczny klasy I przeznaczony do wykonywania tymczasowych koron i mostów poza jamą ustną pacjenta.

Opis

- tworzywo samopolimeryzujące,
- odpowiednia elastyczność i wytrzymałość mechaniczna do wykonywania dużych mostów,
- możliwość uzyskania idealnego koloru tymczasowego uzupełnienia dzięki bogatej paletce kolorystycznej (WIEDENT i V),
- spełnia wymagania normy PN-EN ISO 10477.

Surowce użyte do produkcji

Tworzywo Estetic Special składa się z proszku – polimeru metakrylanu metylu z dodatkiem pigmentów oraz płynu – zawierającego monomer metakrylanu metylu i N,N dimetylo-p-toluidynę.

Sposób postępowania

Zalecane proporcje wagowe proszek/płyn 2:1.

Do naczynia wlać odpowiednią ilość płynu i stopniowo dosypywać proszek aż do całkowitego nasycenia proszku płynem. Mieszać przez kilka sekund - roztwór powinien mieć **konsystencję gęstej śmietany**. Zamknąć szczelnie naczynie i pozostawić pod przykryciem na czas ok. 2 - 5 minut (w zależności od temperatury otoczenia). Wyższa temperatura przyspiesza polimeryzację, niższa opóźnia. Sprawdzić łopatką plastyczność - gdy uznamy, że tworzywo osiągnęło stadium największej plastyczności (jest to faza następująca tuż po fazie tzw. "ciągnących się nitek") należy przystąpić do nakładania. Plastyczne tworzywo formować na powierzchni modelu i stopniowo prasować w puszcze polimeryzacyjnej. Uzupełnienia polimeryzować w wodzie o temperaturze 40-50°C pod ciśnieniem 2 barów przez ok. 10 minut. Korony i mosty po polimeryzacji obrabiać i polerować ogólnie stosowanymi sposobami.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

Płyn łatwopalny, drażniący - unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu spłukać obficie wodą, ewentualnie zgłosić się do lekarza okulisty. Nie wylewać resztek płynu do ujęć kanalizacyjnych. Ostrzega się protetyka przed wdychaniem pyłu podczas wykonywania prac protetycznych. Przy pracach tych zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.

Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjenta następujących wskazówek:

- mosty i korony wykonane z tworzywa Estetic Special należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów,
- mosty i korony, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog.

Opakowania

Komplety:

- 100 g proszku (dentyna - 75 g, szklivo - 25 g), 50 ml płynu,
- kolory V - A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3,
- kolory WIEDENT - A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5,
- 100 g proszku, 50 ml płynu w dwóch zestawach:

kolory V - (po 12,5 g dentyna A1, A2, A3, A4, B2, C2, D3; 12,5 g szklivo),

kolory WIEDENT - (po 12,5 g dentyna A2, B3, G1, G2, N3, R1, R5; 12,5 g szklivo).

Warunki przechowywania i transportu

W szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach niedostępnych dla dzieci. Podczas przechowywania i transportu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Tworzywo Estetic Special trzeba zużyć w czasie nie dłuższym niż 5 lata od wyprodukowania.

Podstawa prawna

Tworzywo Estetic Special spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.

Stosowane symbole



Wytwórca



Przestrzegać instrukcji używania



Znak zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745



Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania



Chronić przed światłem słonecznym



Produkt jest wyrobem medycznym



Nr serii



Termin ważności

